

Záručný list

Záručné podmienky

Na Beltone Direct Phone Link je záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. V rámci záručnej doby Vám budú po predložení tohto záručného listu výrobné závady bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym ošetrovaním, neodborným zásahom alebo mechanickým poškodením.

Záručný a pozáručný servis:

AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 414 27 12
E-mail: audiofon@audiofon.sk


NÁVOD NA POUŽITIE BELTONE DIRECT PHONE LINK



Vyhlasenie

Všetky zariadenia Beltone Direct Line pracujú v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia je viazaná nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

Zobrazenie Phone Link

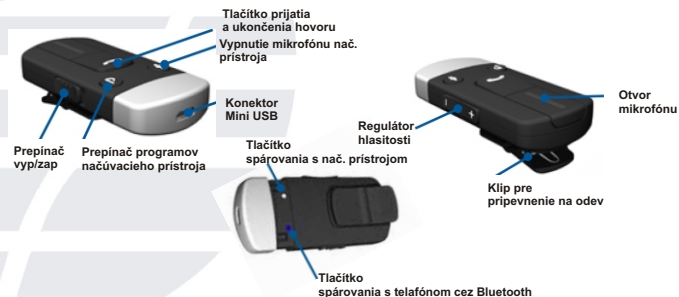

Spárovanie s načúvacím prístrojom

Medzi Phone Link a načúvacím prístrojom nesmie byť vzdialenosť väčšia ako 3 m. Pred použitím Phone Link je nutné ho spárovať s načúvacím prístrojom. Dodržte nasledovný postup:

1. Uistite sa či sú akumulátory nabité a či je Phone Link zapnutý, načúvací prístroj musí byť vypnutý otvorením batériových dvierok
2. Odstráňte strieborný kryt a perom krátko stlačte biele tlačítko spárovania s nač. prístrojom, spárovanie bude indikované jedným bliknutím žltej diódy každé 2 sekundy a bude samočinne prebiehať 20 sekúnd.
3. Po aktivácii párovania zatvorte na prístroji batériové dvierka. Úspešné spárovanie bude indikované melódiou, dióda zostane svietiť na 2 sekundy.

Spárovanie s mobilným telefónom cez Bluetooth

Pred spojením Phone Link s mobilným telefónom sa uistite či telefón podporuje prenos Bluetooth, ak áno je nutné ho aktivovať. Následne je potrebné vykonať dve operácie: spárovanie a pripojenie.

Spárovanie

Phone Link môžete spárovať s 8 Bluetooth zariadeniami, len 2 však môžu byť používané súčasne. Spárovanie Bluetooth musíte nastaviť v telefóne, každý telefón má inak štrukturované menu, riadte sa preto návodom na použitie.

1. Zapnite Phone Link odstráňte strieborný kryt a umiestnite ho do blízkosti telefónu, uistite sa či je telefón zapnutý.
2. V menu alebo submenu telefónu vyhľadajte záložku s významom "Pripojenia" a v nej nájdite nastavenie Bluetooth
3. Zapnite funkciu Bluetooth
4. Na Phone Link perom stlačte modré tlačítko spárovania s mobilným telefónom. Phone Link bude 2 minúty v režime párovania vyhľadávať spojenie s telefónom.
5. V telefóne aktivujte vyhľadávanie zariadení Bluetooth
6. Na displeji telefónu by sa mali zobrazit' nájdené Bluetooth zariadenia. Na zozname označte "Hearing Aid Phone".
7. Telefón bude požadovať kód. Zadaťte "0000" (štyri nuly). Teraz by mal byť Phone Link úspešne spárovaný s telefónom. Niektoré telefóny môžu požadovať, ktorú službu Bluetooth chcete povoliť, v tomto prípade zvolte "Headset" (slúchadlá, náhlavná súprava a pod.).

Pripojenie

Po spárovaní v zozname nájdených Bluetooth zariadení v telefóne nájdite Phone Link a zvolte "Pripojiť".



Na displeji by sa mal zobrazit' takýto alebo podobný symbol:

Spojenie medzi telefónom bude udržiavané pokiaľ budú obidva zariadenia zapnuté a pokiaľ sa nevzdialia z dosahu, ak sa preruší, musíte pociť pripojenia zopakovať. Niektoré telefóny majú funkciu automatickej obnovy spojenia, odporúčame Vám ju použiť.

Používanie telefónu

1. Prijatie a ukončenie hovoru

Raz stlačte tlačítko prijatia a ukončenia hovoru: aktívny hovor bude ukončený a prichádzajúci hovor čakajúci v poradi (signalizovaný krátkymi tónmi) bude prijatý.

2. Odmietnutie hovoru

Dvakrát stlačte tlačítko prijatia a ukončenia hovoru: aktívny hovor nebude prerušený a prichádzajúci hovor čakajúci v poradi (signalizovaný krátkymi tónmi) bude odmietnutý.

3. Prenos hovoru začatého telefónom do Phone link

Raz stlačte tlačítko prijatia a ukončenia hovoru

4. Odloženie aktívneho hovoru do poradia

Stlačte a podržte tlačítko prijatia a ukončenia hovoru 2 sekundy: ak je počas aktívneho hovoru iný hovor v poradi alebo prichádza ďalší hovor, tento sa stane aktívnym, a aktívny hovor bude uložený do poradia.

5. Opakovaná voľba

Dvakrát kliknite na tlačítko prijatia a ukončenia hovoru pokiaľ nie je aktívny žiadny hovor: ak sú pripojené 2 telefóny, táto operácia sa spustí na posledné spárovanom telefóne.

6. Hlasové vytáčanie

Stlačte a podržte tlačítko prijatia a ukončenia hovoru 2 sekundy: ak sú pripojené 2 telefóny, táto operácia sa spustí na posledné spárovanom telefóne. Táto funkcia musí byť dostupná v telefóne.

7. Vypnutie a zapnutie mikrofónu nač. prístroja počas hovoru

Stlačte tlačítko vypnutia mikrofónu nač. prístroja na prednej strane Phone Link (podľa obrázku na 1. strane). Táto funkcia je dostupná iba pre nač. prístroje Promise.


Phone Link ako diaľkový ovládač

Phone Link môžete používať ako jednoduchý diaľkový ovládač nač. prístroja. Pre nastavenie hlasitosti sa používajú tlačítka "+" a "-" na bočnej strane Personal Audio Link, programy môžete prepínať prepínačom programov nač. prístroja (obrázok na 1.strane).

Ak chcete využívať funkciu diaľkového ovládača Phone Link pri nač. prístrojoch True, musí byť nač. prístroj prvý raz spárovaný s diaľkovým ovládačom Beltone Direct Line Remote Control.

Nabíjanie akumulátora

Pred použitím Phone Link musíte nabiť akumulátor. Pripojte sieťový adaptér podľa obrázku na 1. strane a nechajte ho pripojený až do plného nabitia akumulátora. Počas nabíjania bude dióda svietiť na červeno. Po úplnom nabití, ak je stále pripojený adaptér, bude dióda svietiť na zeleno a bude každé 2 sekundy prerušované blikat' červeným svetlom, teraz môžete adaptér odpojiť. Nabíjanie trvá približne 3 hodiny. Ak bude batéria slabá, dióda bude blikat' žltou farbou. Pri normálnej prevádzke bude blikat' zelenou farbou. Akumulátor má optimálnu životnosť 100 nabíjajúcich cyklov.

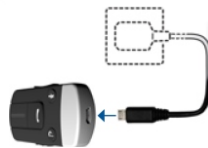

Operačný dosah Phone Link

Phone Link má dosah spojenia s nač. prístrojom do 3 m. Dosah Bluetooth spojenia s telefónom je približne 10 m, pričom je požadovaná priama viditeľnosť obidvoch zariadení, nemali by medzi nimi byť prekážky. Ak bude Bluetooth spojenie prerušené z dôvodu prekročenia operačného dosahu, Phone Link sa pokúsi spojenie obnoviť. Úspešnosť obnovenia závisí na dĺžke prerušenia a parametroch telefónu.

Prípevnenie na odev

Pre pohodlné používanie môžete Phone Link pripevniť na odev pomocou klipu na zadnej strane. Pre optimálne snímanie hlasu by mal byť Phone link umiestnený vo vzdialenosti 10 až 35 cm od Vašich úst.