

Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti sa používajú tlačítka "+" a "-" na vrchu TV Link (obrázok na l.strane)

Spustenie prenosu

Zapnite TV prijímač, HiFi zariadenie alebo iný zdroj signálu. Zapnite načúvaci prístroj. Stlačte tlačítko voľby programu asi na tri sekundy. V prístroji sa ozve melódia a začne sa prenos zvuku.

TV Link je možné ovládať aj diaľkovým ovládačom Beltone Direct Remote Control, ktorý nie je súčasťou balenia. Popis ovládania je v návode na použitie Direct Remote Control.

TV Link má dosah vysielania 7 m

Pri prekročení tejto vzdialenosti bude prenos prerušený, keď sa vrátite do dosahu vysielania do 5 minút, nač. prístroj sa automaticky pripojí.

Ak sa vo vzájomnom dosahu používa viac zariadení TV Link, musíte ich postupne spárovať s nač. prístrojmi na rôznych kanáloch.

Záručný list

Záručné podmienky

Na Beltone Direct TV Link je záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. V rámci záručnej doby Vám budú po predložení tohto záručného listu výrobné závady bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym ošetrovaním, neodborným zásahom alebo mechanickým poškodením.

Záručný a pozáručný servis: AUDIOFON, s.r.o.

Kapitána Jaroša 3A

974 11 Banská Bystrica

Tel.: 048 / 414 27 12

E-mail: audiofon@audiofon.sk

NÁVOD NA POUŽITIE BELTONE DIRECT TV LINK



Vyhľadanie

Všetky zariadenia Beltone Direct Line pracujú v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia je viazaná nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

Zobrazenie TV link



Spárovanie s načúvacím prístrojom

TV Link je možné spárovať s nač. prístrojom na 3 prenosových kanáloch. Viac kanálov umožňuje využívať viac zariadení TV Link súčasne bez vzájomného rušenia.

Pred použitím TV Link je nutné ho spárovať s načúvacím prístrojom. Dodržte nasledovný postup:

1. Uistite sa či je TV link pripojený k elektrickej sieti cez napájací adaptér, musí svietiť zelená dióda

Spárovanie na 1. kanáli

2. Krátko raz stlačte tlačítko spárovania, spárovanie bude samočinne prebiehať 20 sekúnd. Spárovanie na 1. Kanáli bude indikované jedným bliknutím žltej diódy každé 2 sekundy.

Spárovanie na 2. a 3. kanáli

Pre spárovanie na 2. kanáli krátko dvakrát stlačte tlačítko spárovania, pre spárovanie na 3. kanáli ho krátko stlačte trikrát. Pri spáovaní na 2. kanáli bude žltá dióda blikat' dvakrát každé 2 sekundy, pri spáovaní na 3. kanáli bude blikat' trikrát každé 2 sekundy

3. Po aktivácii párovania zatvorte na prístroji batériové dvierka. Úspešné spárovanie bude indikované melódiou. Teraz je TV Link pripravený k používaniu.

Výroba: Beltone A/S
Lautrupbjerg 9
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
www.beltone-hearing.com


Distribútor: AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 414 27 12
E-mail: audiofon@audiofon.sk
www.audiofon.sk

Inštalácia TV Link

TV Link je možné pripojiť k Vášmu TV prijímaču alebo HiFi zariadeniu viacerými spôsobmi podľa ich vybavenia výstupnými zásuvkami (cinch, jack, scart). Súčasťou balenia je sada káblov a adaptérov, pri ich použití by nemala nastať situácia, že nebude možné priviesť do TV Link zvukový signál.


Pri pripojení TV Link postupujte podľa obrázkov.

Pripojenie analógového signálu cez konektory cinch

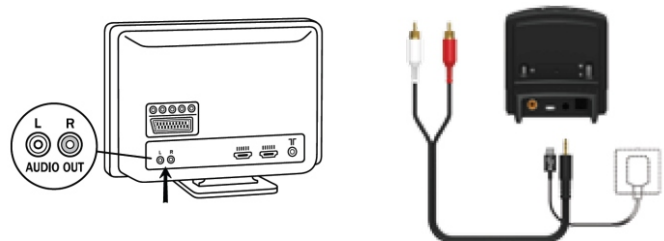


Alternatívne pripojenie analógového signálu cez konektor jack s použitím adaptéra

Pri tomto pripojení sa využíva zásuvka slúchadlového výstupu, na niektorých typoch TV prijímačov môžu byť po zasunutí konektora jack odpojené reproduktory, ak k tomu dojde, odporúčame použiť iný spôsob pripojenia.

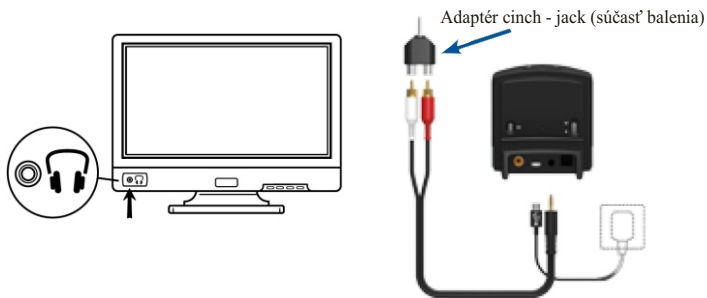

Pripojenie cez adaptér scart

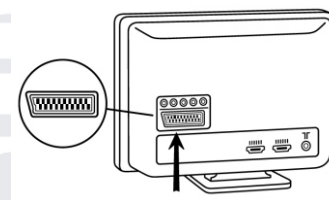


Adaptér scart (súčasť balenia)



Použitie optického audio vstupu Toslink

Kábel pre optické pripojenie nie je súčasťou balenia.

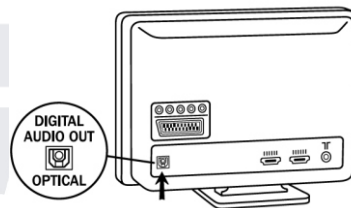

Použitie koaxiálneho audio vstupu

Kábel pre pripojenie koaxiálneho vstupu nie je súčasťou balenia.

