

Návod na obsluhu

ReSound Remonte Control Basic

GN Making Life Sound Better



Obsah:

Ako používať Váš diaľkový ovládač	4
Výmena batérie:	7
Varovania – Batérie:.....	9
Čistenie a údržba:	10
Poradca pri riešení problémov:.....	11
Varovania:	11
Regulačné informácie:.....	13
Záručný list:	15

Váš diaľkový ovládač

Úvod:

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Dúfame, že tento diaľkový ovládač urobí Váš život s načúvacími prístrojmi príjemnejší a jednoduchší.


Táto používateľská príručka obsahuje inštrukcie pre používanie diaľkového ovládača. Pre informácie o používaní načúvacích prístrojov si prosím prečítajte používateľskú príručku k Vášmu načúvaciemu prístroju.

Mienené použitie:

Váš bezdrôtový ovládač je určený pre bezdrôtové ovládanie Vašich načúvacích prístrojov


Pohľad spredu:

1. Indikátor stlačenia tlačidla
2. Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti
3. Tlačidlo pre zníženie hlasitosti
4. Tlačidlo pre zmenu programu

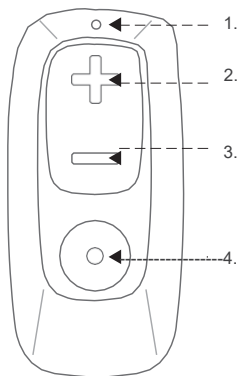

Pohľad zozadu:

5. Priestor na batériu
6. Tlačidlo pre párovanie
7. Dierka na kľúčenu

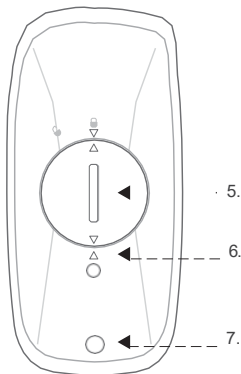

POZNÁMKA: Malé symboly nad priestorom na batériu indikujú správne zatvorenie batériových dvierok

Ako používať Váš diaľkový ovládač

Spojenie diaľkového ovládača s načúvacím prístrojom:

Pred tým ako začnete používať diaľkový ovládač, musí byť spárovaný s Vaším načúvacím prístrojom. Pre spárovanie postupuje podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zatlačte tlačidlo pre párovanie na zadnej strane diaľkového ovládača použitím tenkého a špicatého nástroja. Po zatlačení tlačidla na párovanie sa diaľkový ovládač na 20 sekúnd prepne do režimu párovania.



2. Vypnite a zapnite Váš načúvací prístroj a umiestnite ho k diaľkovému ovládaču.
3. Po úspešnom spárovaní sa ozve potvrdzujúca melódia vo Vašom načúvacom prístroji.
4. Teraz môžete používať Váš nový diaľkový ovládač.



POZNÁMKA: Váš špecialista na načúvacie prístroje mohol spárovať diaľkový ovládač s Vaším načúvacím prístrojom.



VAROVANIE: Pokiaľ pri používaní diaľkového ovládača spozorujete podráždenie kože, ihneď kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje.



POZNÁMKA: Diaľkový ovládač pripájajte výhradne v súlade s jeho mieneným použitím

Vizuálny indikátor:


Indikátor stlačenia tlačidla na Vašom diaľkovom ovládači sa rozsvieti vždy keď stlačíte tlačidlo ovládania hlasitosti alebo zmeny programu.

Keď je diaľkový ovládač v režime párovania, indikátor stlačenia tlačidla bliká v 2 sekundovom intervale.

Zmena hlasitosti:

Vaše načúvacie prístroje upravujú úroveň hlasitosti automaticky podľa ich úvodného nastavenia, no niekedy je nutné upraviť hlasitosť manuálne tak, aby vyhovovala Vaším požiadavkám. Pre zmenu hlasitosti postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Stlačte vrchnú časť tlačidla pre zmenu hlasitosti (+) pre zvýšenie úrovne hlasitosti.
2. Stlačte spodnú časť tlačidla pre zmenu hlasitosti (-) pre zníženie úrovne hlasitosti.

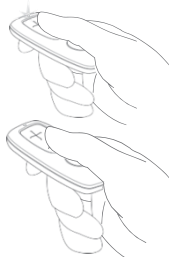

i POZNÁMKA: Vaše načúvacie prístroje sa po vypnutí vrátia na pôvodnú úroveň hlasitosti.

i POZNÁMKA: Pre úplné stíšenie načúvacích prístrojov stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti (-) na viac ako 1 sekundu.

Zmena programu vo Vašich načúvacích prístrojoch:

1. Pre zmenu programu stlačte programové tlačidlo



i Vaše načúvacie prístroje sa po vypnutí vrátia na prednastavený posluchový program.

Streamovanie zvuku do Vašich načúvacích prístrojov:

S diaľkovým ovládačom môžete jednoducho prepnúť Váš načúvací prístroj do streamovacieho programu (ak bol nastavený) pre priamy prenos zvuku z Vášho bezdrôtového príslušenstva do načúvacích prístrojov. Pre aktiváciu streamovacieho programu postupujte nasledovne:

1. Podržte programové tlačidlo stlačené aspoň jednu sekundu, alebo dokiaľ sa nezozve potvrdzovacia melódia v načúvacích prístrojoch.
2. Pre návrat do posluchového programu ktorý ste používali predtým, jedenkrát stlačte programové tlačidlo.



Zamknutie diaľkového ovládača:

Váš diaľkový ovládač môžete jednoducho zamknúť, aby ste predišli nechceným zmenám na načúvacom prístroji. (napr. pri nosení ovládača vo vrecku)

1. Stlačte naraz programové tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) na 5 sekúnd. Indikátor stlačenia tlačidla trikrát zabliká
2. Pre odomknutie diaľkového ovládača zopakujte Krok 1. Po úspešnom odomknutí indikátor stlačenia tlačidla jedenkrát zabliká.



POZNÁMKA: Ak stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači pokiaľ je ovládač zamknutý, indikátor stlačenia tlačidla vždy trikrát zabliká a nevykoná sa žiadna zmena v nastaveniach.


Výmena batérie:

Používajte výhradne batérie typu CR2032.




POZNÁMKA: Vždy používajte nové batérie ktoré Vám odporučil špecialista na načúvacie prístroje.


1. Pomocou mince otočte kryt priestoru na batérie proti smeru hodinových ručičiek

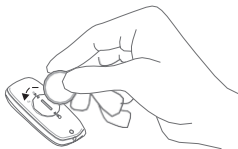

2. Vložte batériu podľa obrázku. Uistite sa že symbol „+“ na batérii smeruje nahor.

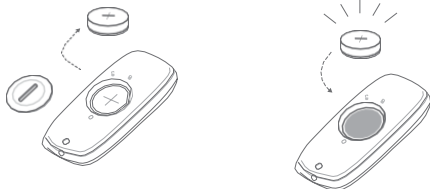

3. Zavrite priestor na batériu otočením krytu v smere hodinových ručičiek použitím mince. Uistite sa že kryt lícuje s telom diaľkového ovládača a šípky sú zarovnané.

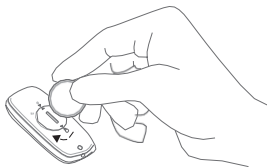


i POZNÁMKA: Uistite sa, že po zatvorení krytu batérie smerujú (lícuju) šípky na kryte batérie so šípkami na diaľkovom ovládači.

i POZNÁMKA: Pokiaľ si nie ste istý či je kryt batérie bezpečne zatvorený, požiadajte o pomoc Vášho špecialistu na načúvacie prístroje.

Kontrola správneho zatvorenia krytu batérie:


Pokiaľ je kryt batérie správne zatvorený, šípky by mali vyzerať nasledovne:

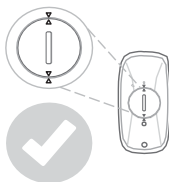

Pozrite sa na Váš diaľkový ovládač z boku a skontrolujte, či kryt batérie lícuje diaľkovým ovládačom.



Tento kryt batérie **nie je** správne zatvorený – šípky na kryte batérie nelicujú so šípkami na diaľkovom ovládači

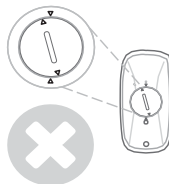

Pokiaľ kryt batérie nelicuje s telom diaľkového ovládača **nie je** správne zatvorený.



⚠ Varovania – Batérie:

Váš diaľkový ovládač je napájaný gombíkovou batériou. Venujte pozornosť týmto bezpečnostným varovaniam pred používaním diaľkového ovládača.

- 1) Batérie môžu byť pri prehltnutí nebezpečné:
 - ⚠ Nikdy si nekladajte batérie do úst. Gombíkové batérie môžu spôsobiť chemické popáleniny.
 - ⚠ Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí, mentálne znevýhodnených osôb a zvierat.
- 2) **Pokiaľ ste batériu požili, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri prehltnutí môže tento typ batérie spôsobiť fatálne vnútorné popáleniny už po 2 hodinách po požití.**

- 3) Batérie môžu vytiecť – preto vyberte batériu z diaľkového ovládača pokiaľ ho dlhší čas nepoužívate.
- 4) Batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Nikdy sa ich nepokúšajte spáliť. Použité batérie vždy ekologicky zlikvidujte podľa miestnych predpisov, alebo ich vráťte Vášmu špecialistovi na načúvacie prístroje.
- 5) Uchovávajte kryt batérie mimo dosahu detí, mentálne znevýhodnených osôb a zvierat – pri prehltnutí môže byť nebezpečný.
- 6) Pokiaľ nemôžete správne a bezpečne zatvoriť kryt batérie, prestaňte používať diaľkový ovládač a uchovávajte ho mimo dosah detí, mentálne znevýhodnených osôb a zvierat.
- 7) Nikdy nenabíjajte gombíkové batérie – môžu vytiecť alebo vybuchnúť

Čistenie a údržba:

Ako čistiť Váš diaľkový ovládač:

- 1- Utierajte diaľkový ovládač suchou a mäkkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte na čistenie domáce čistiace prostriedky (čistiaci prášok, mydlo a pod.) alebo alkohol.
- 2- Vždy čistite diaľkový ovládač nad mäkkým povrchom – predídete tak poškodeniu pri páde.
- 3- Chráňte Váš diaľkový ovládač pred vlhkosťou (sprchovanie, plávanie a pod.) a teplom (radiátor, palubná doska auta a pod.)
- 4- Chráňte Váš diaľkový ovládač pred nadmernými otrasmi a nárazmi



Varovanie: Na čistenie nikdy nepoužívajte vodu ani inú tekutinu – môže dôjsť k poškodeniu.



POZNÁMKA: Kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje ohľadom likvidácie diaľkového ovládača.

Poradca pri riešení problémov:

Porucha:	Potenciálna príčina:	Potenciálne riešenie:
Indikátor stlačenia tlačidla nesvieti pri stlačení tlačidla.	1: Batéria je vybitá. 2: Batéria nie je správne vložená. 3: Diaľkový ovládač je zaneprázdnený komunikáciou s načúvacím prístrojom.	1: Vymeňte batériu. 2: Vložte batériu správne. 3: Počkajte niekoľko sekúnd a znovu stlačte tlačidlo.
Indikátor stlačenia tlačidla funguje, no po stlačení tlačidla sa hlasitosť alebo program nezmení.	Diaľkový ovládač je mimo dosah načúvacích prístrojov (napríklad vo vrecku a pod.)	Presuňte diaľkový ovládač bližšie k načúvacím prístrojom.

Varovania:



Všeobecné varovania:

1. Nikdy nevystavujte načúvací prístroj extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
2. Nepoužívajte diaľkový ovládač počas šoférovania.
3. Nepoužívajte diaľkový ovládač v oblastiach s rizikom výbuchu alebo vznietenia horľavých látok.
4. Röntgenové žiarenie (napr. CT a MRI) môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť tohto zariadenia. Pred týmto druhom vyšetrením odporúčame vypnúť Váš diaľkový ovládač a nechať ho mimo miestnosti so žiarením.
5. Uchovávajte tento diaľkový ovládač mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
6. Uchovávajte tento diaľkový ovládač mimo pracujúcich strojov.
7. Pokiaľ sa zariadenie prehrieva, bolo vystavené nárazu, bolo poškodené, pokiaľ je poškodený kábel alebo adaptér alebo pokiaľ bolo ponorené do tekutiny, prestaňte ho používať a kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje.

8. Nevystavujte diaľkový ovládač dažďu, vlhkosti alebo iným tekutinám, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu.
9. Váš diaľkový ovládač používa šifrované digitálne vysielanie nízkeho výkonu pre bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami. Aj keď je to nepravdepodobné, niektoré blízke elektronické zariadenia môžu byť ovplyvnené. V takom prípade presuňte diaľkový ovládač ďalej od ovplyvneného zariadenia.
10. Pri používaní môže byť diaľkový ovládač ovplyvnený inými zariadeniami. Pokiaľ je diaľkový ovládač ovplyvnený iným elektromagnetickým žiarením, oddiaľte ho od zdroju rušenia.



Všeobecné opatrenia:

1. Pri nastupovaní do lietadla alebo vstupe do oblasti kde sú zakázané RF vysielacie, deaktivujte všetky bezdrôtové funkcie. Prečítajte si užívateľskú príručku k Vaším načúvacím prístrojom pre informácie o letovom režime Vašich načúvacích prístrojov. Nastavenie načúvacích prístrojov do letového režimu vypne bezdrôtovú funkcionálnosť načúvacích prístrojov a aj diaľkového ovládača.
2. Pokiaľ načúvacie prístroje nereagujú na zmeny vykonané na diaľkovom ovládači kvôli rušeniu inými zariadeniami, presuňte sa ďalej od zdroju rušenia.
3. Nepoužívajte toto zariadenie v oblastiach kde je zakázané používanie elektronických zariadení.
4. Vášmu načúvaciemu prístroju a diaľkovému ovládaču bol pridelený unikátny komunikačný kód, ktorý zabezpečuje, aby pri ich používaní neboli ovplyvnené iné načúvacie prístroje.
5. Výkonné elektronické zariadenia, veľké elektronické inštalácie a kovové konštrukcie môžu výrazne znížiť dosah Vášho diaľkového ovládača.
6. Otváranie alebo upravovanie diaľkového ovládača ho môže nenávratne poškodiť. Pokiaľ problém s diaľkovým ovládačom nebol vyriešený radami v poradcovi pri riešení problémov uvedenom v tejto užívateľskej príručke, kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje.
7. Diaľkový ovládač môže byť opravovaný iba autorizovaným servisným strediskom.

Regulačné informácie:

Informácie o teplote, preprave a skladovaní:

Váš diaľkový ovládač sa podrobil niekoľkým testom v teplom a vlhkom prostredí v rozsahu -20°C až +60°C v súlade s internými a priemyselnými štandardmi.

Záruka:

Na Váš diaľkový ovládač je poskytovaná 24 mesačná záruka od dňa zakúpenia. Kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje pre ďalšie informácie o záruke.

Na čo sa vzťahuje záruka:

Všetky elektronické súčiastky ktoré kvôli spracovaniu, výrobe alebo designu nefungujú správne pri správnom používaní tohto zariadenia budú zadarmo vymenené alebo opravné (pokiaľ záruka neuplynula) po vrátení zariadenia špecialistovi na načúvacie prístroje u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Pokiaľ bude vyhodnotená vada ako neopraviteľná, celé zariadenie môže byť vymenené za iný ekvivalent po dohode zákazníka a špecialistu na načúvacie prístroje.

Na čo sa nevzťahuje záruka:

Poškodenia plynúce z nesprávneho používania, nadmerného zaťaženia, poškodenia, opráv vykonaných neautorizovanou osobou, vystavenia korozívnemu prostrediu alebo poškodenia v dôsledku cudzieho predmetu v zariadení, nebudú opravené v rámci záruky. Váš špecialista na načúvacie prístroje Vám mohol poskytnúť záruku presahujúcu tieto ustanovenia. Pre viac informácií kontaktujte Vášho špecialistu na načúvacie prístroje.

Európa:

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi regulatívnymi požiadavkami:

Zariadenia vyhovuje základným požiadavkám prílohy I. smernice rady 93/42/EEC pre zdravotnícke pomôcky (MDD)

Týmto spoločnosť GN Hearing A/S vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RC-3 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:
www.declarations.resound.com

Pre ďalšie príslušné medzinárodné požiadavky v krajinách mimo EU a USA si prosím pozrite špecifické požiadavky krajín pre tieto oblasti.



POZNÁMKA: Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom rozsahu 2.4 GHz – 2.48 GHz. Toto zariadenie obsahuje RF vysielač, ktorý pracuje vo frekvenčnom rozsahu 2.4 GHz – 2.48 GHz.

Symbols:



Varovanie poukazuje na situáciu ktorá môže viesť k vážnym úrazom.



Upozornenie poukazuje na situáciu ktorá môže viesť k malým a stredným úrazom.



Rady a tipy o používaní Vášho diaľkového ovládača.



Zariadenie obsahuje RF vysielač.



Postupujte podľa pokynov



Prosím informujte sa u špecialistu na načúvacích prístrojoch o likvidácii načúvacích prístrojov a príslušenstva k nim.



Produkt je aplikovanou časťou Typu B.



V súlade so štandardmi IMDA – DA108167

Technické špecifikácie:

Dosah: Do 3 metrov

Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz

Teplotný rozsah: 0-55 °C

Nominálny RF výstup: 4 dBm

© 2019 GN Hearing A/S. Všetky práva vyhradené

Záručný list:



Dátum predaja.....

Pečiatka a podpis.....



Výrobca:

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Dánsko
www.resound.com
CVRno. 55082715

Distribútor, záručný a pozáručný servis:

AUDIOFON s.r.o

Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica, Slovensko
www.audiofon.sk
tel. 048/ 414 27 12
email: bb@audiofon.sk



Akékoľvek problémy týkajúce sa smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/ECC alebo smernice EÚ o rádiových zariadeniach 2014/53/EU by mali byť adresované GN Hearing A/S.